


PACS instrukser



Shahad Khalid Hussein
Introlæge 12/2024

Menulinien


Filer Redigér Visning Værktøjer Hjælp

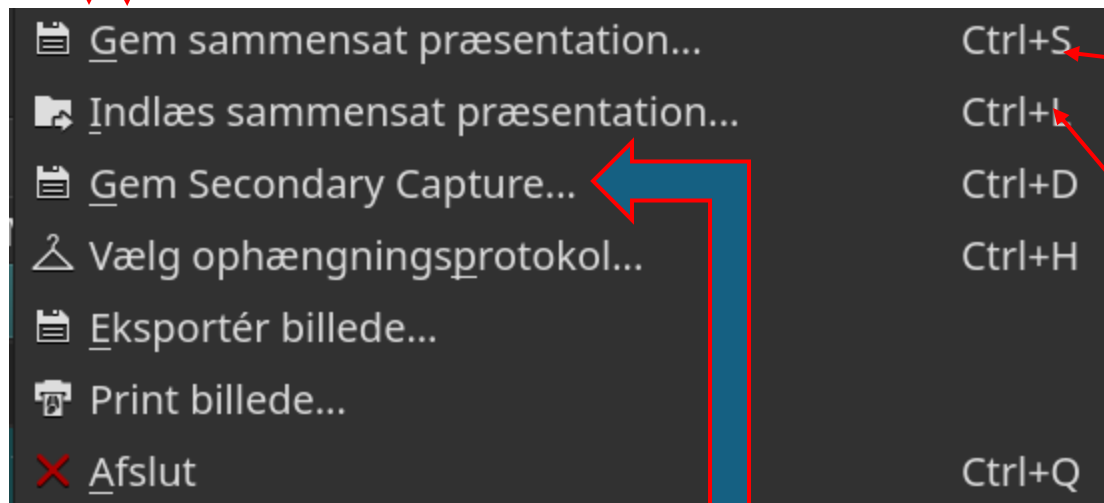

Gem Secondary Capture:Åbner en dialogboks,hvori de aktuelle valg,nøgleobjekterog /eller subtraktioner kan gemmes som Secondary Capture-billeder

Gem sammensat Præsentation: Åbner en dialogboks,der gør det muligt at gemme den sammensatte præsentation består af det aktuelle layout,nøgleobjekter og den aktive præsentation (GPS, COPS ect.). Den komplette applikationstilstand gemmes

Indlæs sammensat Præsentation:Åbner en dialogboks,der gør det muligt at indlæse gemte sammensatte præsentation er en kombination af opsætning,præsentation og nøgleobjekter. Den komplette applikationstilstand gendannes

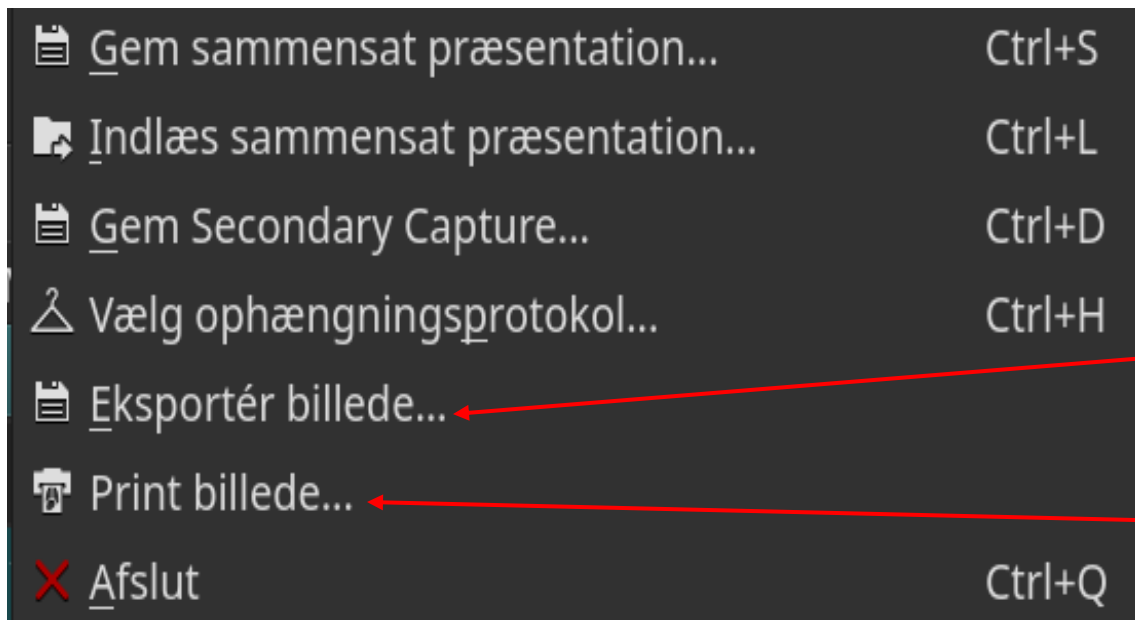

Eksporter af det fokuserede billede

Print billede:printer billedet (secondary capture)i den fokuserede ramme.

Afslut:Afslutter programmet

Filer Redigér Visning Værktøjer Hjælp

Hjem
Fortryd Ctrl+Z
Gendan Ctrl+Y

Værktøjslinier

- Slå billedtekst til/fra
- Slå bitmap overlays til/fra
- Slå linealer til/fra
- Slå histogram til/fra
- Slå LUT-visning til/fra
- Slå Overblik Zoom/Panorér til/fra
- Slå snitindikator til/fra
- Vælg præsentation...

Se på næste
sider

Filer Redigér Visning Værktøjer Hjælp


 Tilpas...

 Tilpas genveje...

 Aktivér genvejstilstand

 Indstillinger...

 Redigér hængeprotokoller...

 Redigér synonymer...

 Redigér billedtekster...

 DICOM Inspektør...


Tilpas: Åbner en dialogboks, hvori menuer og værktøjslinier kan tilpasses

Tilpas genveje: Denne funktion åbner dialogen for genvejsredigering. Dialogen viser en liste over alle værktøjer og gør det muligt at tildele genveje på tasturaret

Aktivér genvejstilstand: Ved at aktivere genvejstilstand er det muligt at klikke på et værktøj og vælge en ønsket genvej uden at først skulle åbne dialogen for genvejsredigering


Indstillinger :åbner en dialog til konfiguration af indstillinger

Rediger hængeprotokoller: Åbner en dialog til redigering af hængeprotokoller

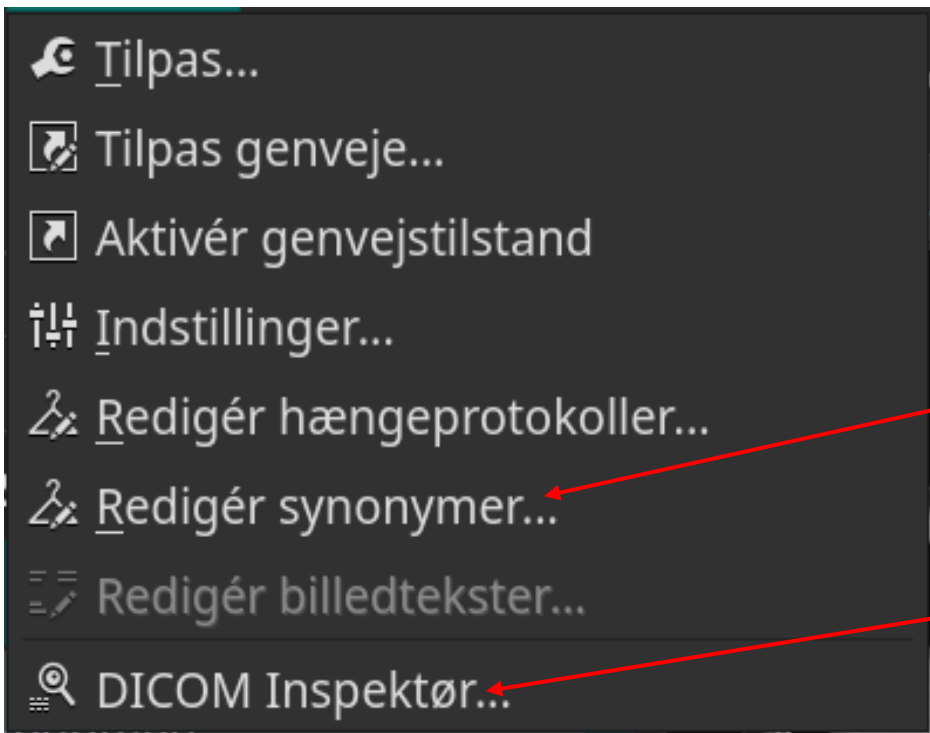

Rediger synonymer: Viser en dialog hvor du kan administrere dine synonymer.

DICOM Inspektør: Se værdierne i det nuværende DICOM datasæt i tekstformat.

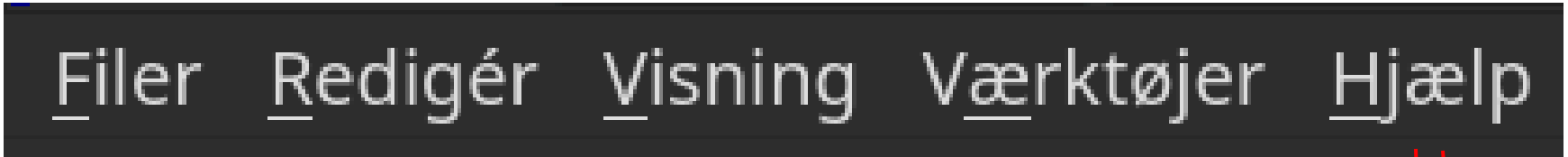

Får online hjælp

Overblik over kolonnedata

The screenshot displays a medical software interface with a dark theme. At the top, there is a menu bar with options: Filer, Redigér, Visning, Værktøjer, and Hjælp. To the right of the menu bar are buttons for 3D, SR, FUS, DOC, and WFM. Below the menu bar is a toolbar with various icons for navigation and viewing. A red bracket highlights a group of icons on the left side of the toolbar, including a star, a person icon, and a pin icon. Another red bracket highlights a group of icons on the right side of the toolbar, including a left arrow, a right arrow, and a magnifying glass icon.

The main area is divided into two columns of image viewers. The left column shows a CT scan of the abdomen from 16-12-2024. The right column shows a CT scan of the abdomen from 19-09-2016. Each viewer has a toolbar with icons for zooming, panning, and other viewing functions.


On the left side, there is a sidebar with a search bar and a list of scan types. The sidebar is titled 'Mousten^Stener' and 'Billeder og dokum...'. It shows a filter for '2024' and a list of scan types with their respective counts:

Scan Type	Count
AX 2 mm Abdomen	234
SAG 2 mm Abdomen	171
COR 2 mm Abdomen	151
AX 1 mm Abdomen	583
Scanogram	

Nulstiller programmet til starttilstanden

Fortryd den sidste udførte handling

Gendan: omgør den sidste fortrudte handling

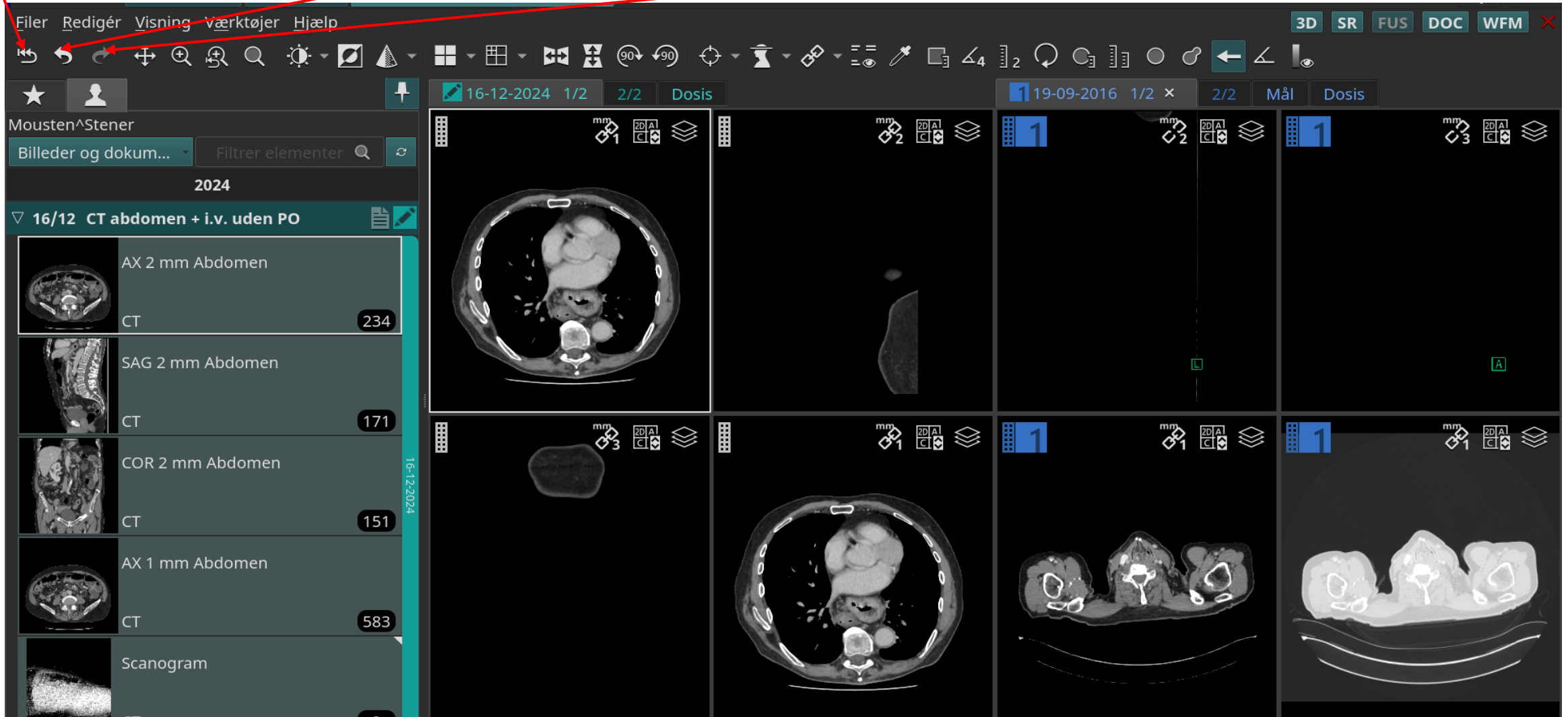

Panorer:når dette værktøj aktiveret kan man panorere ved at gribe fat i et billede med musen og trække det rundt


Nulstil Zoom/Panorer



Zoom:aktiver dette værktøj og zoom ind ved hjælp af venstre musetast for at zoome ud,eller klik og træk for at zoome på et bestemt område .

Forstørrelsesglas:brug dette værktøj til at forstørre dele af billede uden der zoomes på hele billedet.Den aktiveres ved at holde musemarkøren over et billedfelt og trykke shift+højreklik.

LUT Værktøj: Dette værktøj indstiller width/level

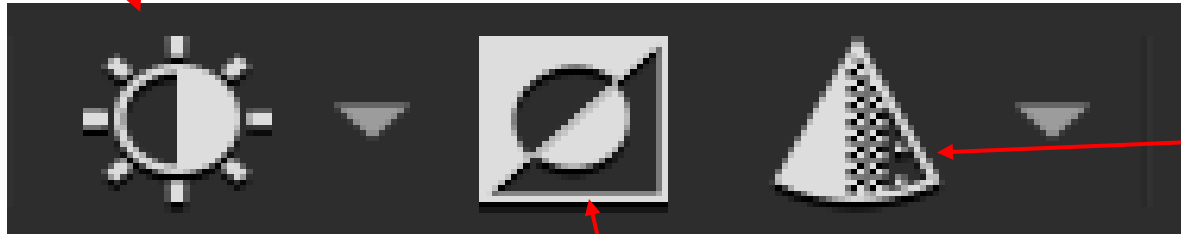

Inverter: inverter monokrom-billede

Slå billedfiltrering til/fra på de valgte billeder. Er ingen billedet, påvirkes kun billedet i fokus. Brug i stedet filterkonfigurationsværktøjet, hvis du vil ændre filteret.

Skærmlayout:åbner dialogen til ændring af skærmlayout

Serie Layout Dialog :åbner dialog til valg af serie layout




Horizontal spejling :Spejler billeder horisontalt

Vertikal spejling : Spejler billeder vertikalt

Roter billedet 90 grader med uret

Roter billedet 90 grader mod uret

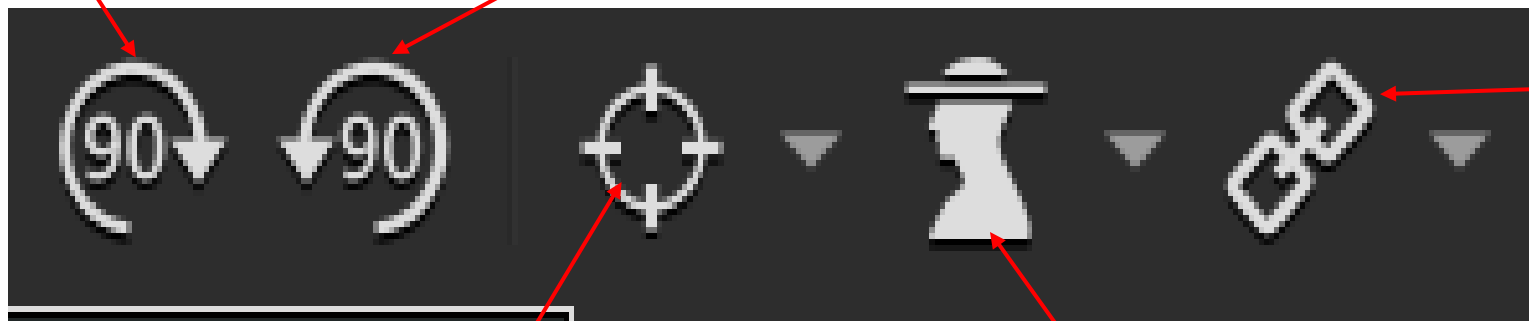

Iso-center visning: når dette værktøj aktiveret kan man navigere alle relaterede billedpaneler til et punkt i rummet, med et enkelt klik


Scout-linier: når dette værktøj aktiveres, vises scout-linier for billederne under musen.

Manuelt link værktøj: aktiver for at linke serier for scroll og /eller zoom/panorer

Slå billedtekst til/fra:denne funktion slår al billedtekst til og fra på de viste billeder.Målinger vil dog stadig være synlige

Pixel intensitetsmåling:når dette værktøj aktiveret kan måle intensiteten for en enkel pixel i et billede

2-punkts afstandsmålin: når dette værktøj aktivt kan der indsættes afstandsmåling er ved at klikke i et billedfelt

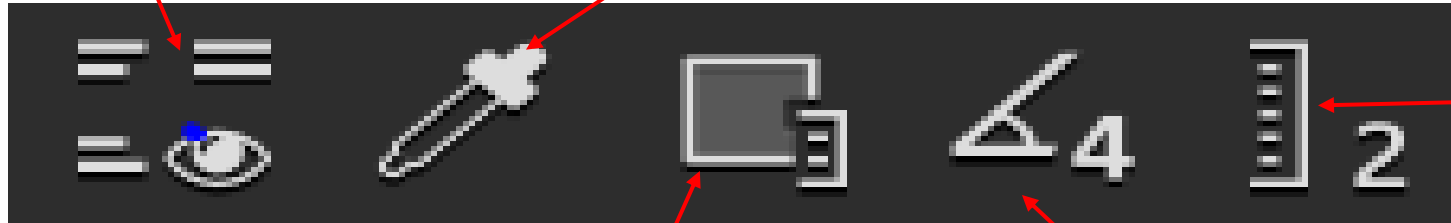


Rektangulær intensitetsmåling:når dette værktøj aktiverets kan indsættes ved at klikke og trække musen i billedet

4-punktsvinkelmåling:når dette værktøj er aktiveret,kan man indsætte vinkelmålinger i et billedet ved hjælp af musen.

Roter: brug dette værktøj til at rotere billeder, ved at klikke musen i en cirkel omkring billedets centrum

Cirkulær intensitetsmåling: når dette værktøj aktiveret kan man indsætte intensitetsmålinger ved at klikke og trække musen i et billede

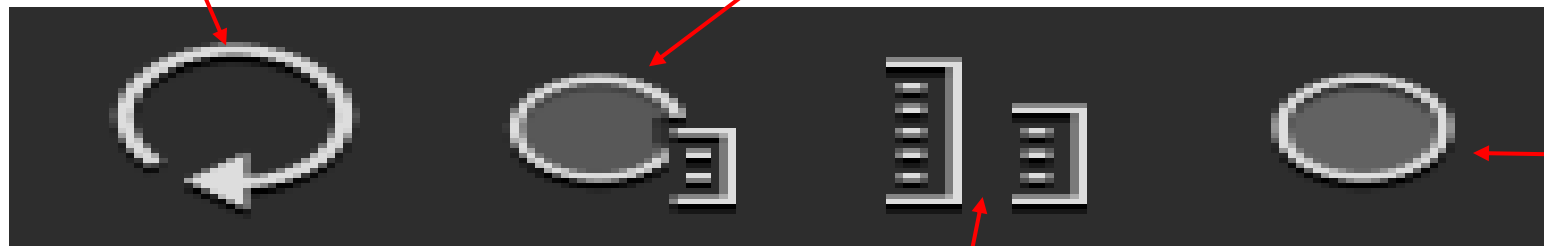


Cirkel: Brug dette værktøj til at tegne en cirkel på billedet

Afstandsforholdsmåling: når dette værktøj er aktiveret, kan der indsættes afstandsmålinger ved at klikke på et billede. Dobbeltklik eller vælg et nyt værktøj for at afslutte en måling

Frihånd: Brug dette værktøj til at tegne frit på et billede

Pil: Brug dette værktøj til at tegne en pil på et billede

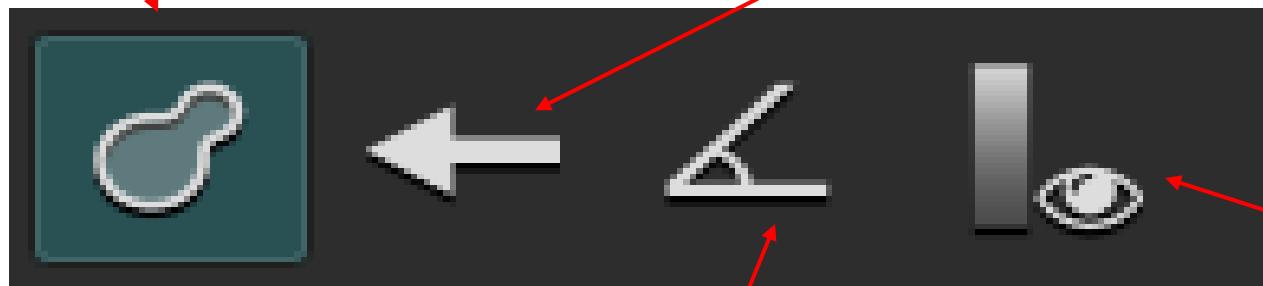


3-punktsvinkelmåling: når dette værktøj er aktivt, kan der ibdsættes vinkelmålinger ved at klikke i et billedfelt.

Slå LUT-visning til/fra :vis eller skjul LUT-visning i alle billedfelter

Bogmærker : Denne tab er til bogmærker. Bogmærker er referencer til annotationer og målinger

Undersøgelsoversigt: Denne fane giver et overblik over nuværende patientundersøgelser.



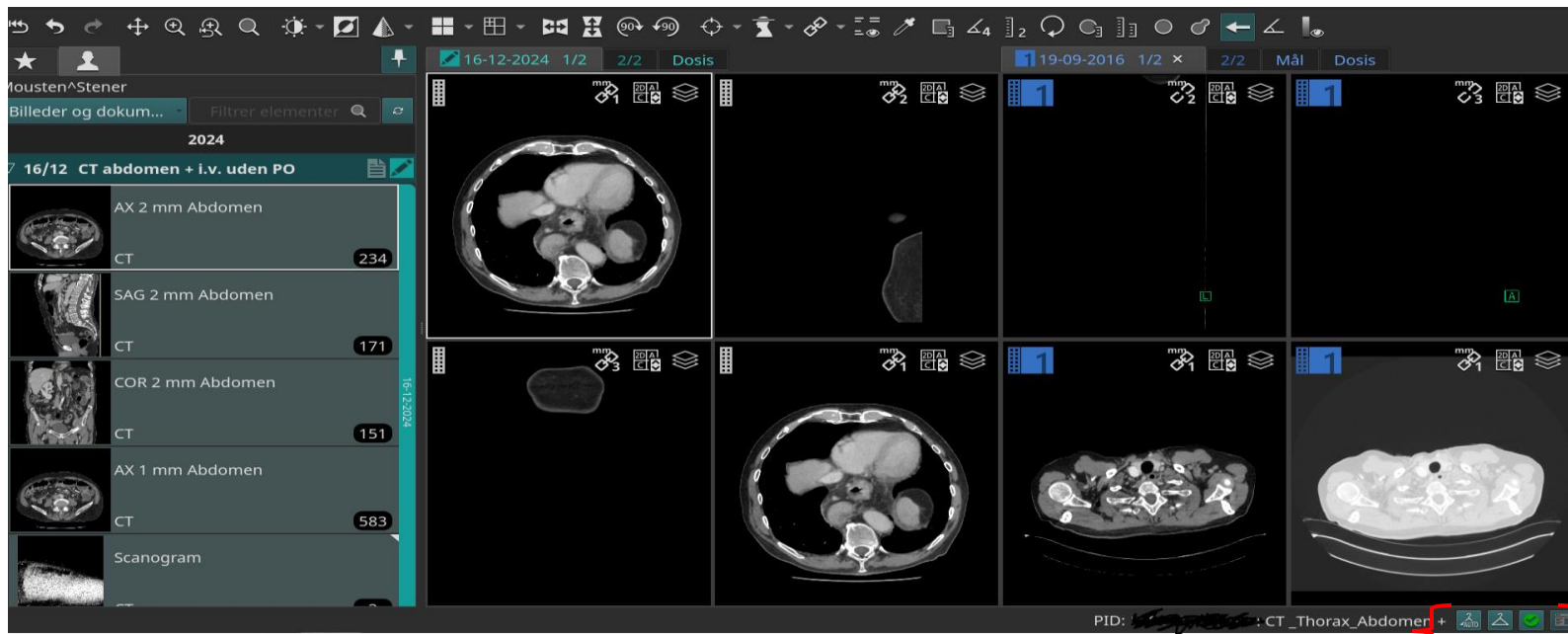

Aktiver standard ophængnings protokol

Vælg ophængningsårotokol:Åbner dialogen til valg af ophængningsprotokol

Skift visning af mediebrowseren